



senectovia®



- Besonders geeignet bei instabilen Frakturen
- Zur Dekubitus-Prophylaxe bei Höchststrisikopatienten
- Wirksame Therapie bei bereits bestehenden Druckgeschwüren

NoDec P

senectovia medizinaltechnik

Stabilität 1

Zwei innenliegende Längszellen sorgen für seitliche Stabilität des Patienten. Das doppelagige Matratzensystem mit seinem Drei-Kammer-Zyklus sorgt dafür, dass auch bei Schwerstpatienten bis 250 kg kein Durchliegen oder -Sitzen möglich ist.

Anwenderkomfort 2

- Neueste Techniken, mit Displayanzeige, sorgen für eine komfortable und sichere Anwendung.
- Per Knopfdruck ist die Betriebsart von dynamisch auf statisch mit einer jeweils individuellen Komfort-Einstellung fest, medium oder weich wechselbar.
- Maximale Füllung für pflegerische Massnahmen.
- Automatische Matratzenentleerung.

Matratzenaufbau 3




Der spezielle Matratzenaufbau mit zwei innenliegenden Längszellen sorgt für seitliche Stabilität des Patienten. Jeweils drei nebeneinanderliegende Luftzellen werden synchron mit den drei darunterliegenden Luftzellen im Zyklus von 15 Minuten mit Luft gefüllt und wieder entleert. Dadurch wechseln die Auflagepunkte des Körpers. Auf den entleerten Zellen (in der Grafik weiss dargestellt) besteht Null-Auflagedruck, der alle 5 Minuten die nächste Zelle erreicht.

Matratzenverlängerung 4

«Durch einfaches Umlegen von zwei Ventilen kann die Matratze verlängert werden.

CPR 5

«Im Falle des Falles» ist eine Schnellentlüftung der Matratze mittels eines völlig neuentwickelten CPR-Ventils möglich.

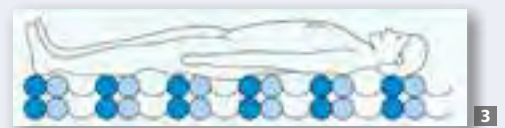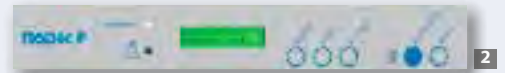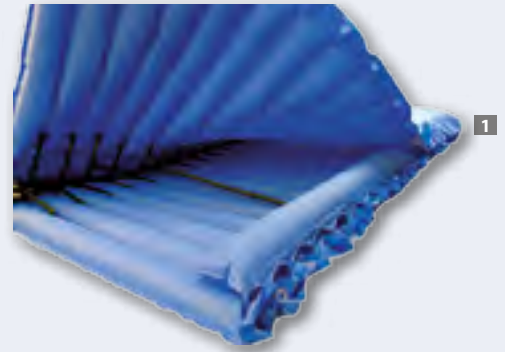

Die einzigartige Dynamik des Auffüllens und Entleerens der Zelle erzeugt rhythmische Luftwellen.



TECHNISCHE DATEN

NODEC P

Aggregat

Abmessung (LxBxH):	48 x 30 x 13 cm
Gewicht:	7.7 kg
Netzanschluss:	230 Volt / 50 Hz
Stromaufnahme:	50 Watt
Zyklusdauer:	15 Min.
Zykluskontrolle:	Mikroprozessoren gesteuerte pneumatische Schalterbestätigung
Geräuschpegel:	ca. 30 dB (A)

Matratze

Abmessung (LxBxH):	210 x 90 x 23 cm
	200 x 90 x 23 cm
Gewicht:	8.2 kg
Patientengewicht:	30 – 250 kg
Anzahl Luftkammern:	20



senectovia®

senectovia
medizinaltechnik ag

In der Luberzen 1 Tel. 044 735 35 45
CH-8902 Urdorf Fax 044 735 35 40
www.senectovia.ch info@senectovia.ch

HOTLINE: 044 735 35 44

CE