



senectovia®

### Wechseldruck Statische Lagerung Bauchlagerung

- Reduziert regelmässig und vollständig den auftretenden Druck an der Hautoberfläche
- Auflage aus Polyurethan, atmungsaktiv und elastisch, flüssigkeitsdicht
- Einfache und präzise Druckregulierung sowie individuell auf den Patienten abgestimmt
- Einfache und schnelle Reanimationsfunktion (CPR)
- Automatische, vibrationsarme und leise Steuereinheit
- Optisches und akustisches Alarmsystem
- Schmerzreduzierung und optimaler Liegekomfort (besonders geeignet für palliativen Einsatz)



**noDEC** S™

senectovia medizinaltechnik

## Drei Therapien – Ein System

NoDec S bietet drei Therapieformen in einem System:

Wechseldruck, statische Lagerung und Bauchlagerung; Je nach individueller Indikation einstellbar. Umbetten auf ein anderes System bei Veränderung der Behandlungsprioritäten entfällt.

### Wechseldruck 1

Vollständige Druckentlastung jeder Körperpartie im 10-Minuten-Zyklus für jeweils ca. drei Minuten.

### Statische Lagerung 2

Optional statische Lagerung bis in den Wirkungsbereich von anerkannten LowAirloss-Systemen.

### Aufbau 3

Der neuartige Innenaufbau der Matratze erlaubt die Lagerung von Patienten bis 250 kg.

### Anwenderkomfort 4

- Neueste Techniken, mit Displayanzeige, sorgen für eine komfortable und sichere Anwendung
- Per Knopfdruck ist die Betriebsart von Dynamisch auf Statisch mit einer jeweils individuellen Komfort-Einstellung Fest, Medium oder Weich wechselbar
- Maximale Füllung für pflegerische Massnahmen
- Automatische Matratzenentleerung
- Betriebsstundenzähler für Pflegedokumentation

### Bauchlagerung 5

Durch einfaches Umlegen von zwei Ventilen werden die drei Kopfzellen rasch entleert.

### CPR 6

«Im Falle des Falles» ist eine Schnellentlüftung der Matratze mittels eines völlig neuentwickelten CPR-Ventils möglich.



System	Dmax [ mmHg ]	Dmittel [ mmHg ]	Masse [ kg ]	Fläche [ dm² ]
A RL	23.875	9.680	66.2	50.3
B RL	29.249	9.133	65.4	52.7
C RL	24.298	9.559	64.7	49.0
RL	27.055	9.448	67.1	52.2
A SL	24.339	8.920	63.9	52.7
B SL	27.051	8.643	64.9	55.3
C SL	23.747	9.078	60.8	49.3
SL	35.535	10.221	78.4	56.4



## TECHNISCHE DATEN



### Aggregat

Abmessung (LxBxH):	48 x 30 x 13 cm
Gewicht:	7.7 kg
Netzanschluss:	230 Volt / 50 Hz
Stromaufnahme:	50 Watt
Zyklusdauer:	15 Min.
Zykluskontrolle:	Mikroprozessoren gesteuerte pneumatische Schalterbestätigung
Geräuschpegel:	ca. 30 dB (A)
Garantie:	18 Monate

### Matratze

Abmessung (LxBxH):	205 x 87 x 25 cm
	205 x 85 x 25 cm
Gewicht:	11 kg
Patientengewicht:	30 – 250 kg
Anzahl Luftkammern:	18

HOTLINE: 044 735 35 44



senectovia®

senectovia  
medizinaltechnik ag

In der Luberzen 1 Tel. 044 735 35 45  
CH-8902 Urdorf Fax 044 735 35 40  
www.senectovia.ch info@senectovia.ch

